

# CEREDERM® la solution pour atténuer vos cicatrices

## MODE D'EMPLOI

### Qu'est-ce que CEREDERM® ?

Invisible et simple d'utilisation, CEREDERM® est un **pansement siliconé auto-adhésif pour le traitement des cicatrices**.

Le gel de silicone **soulage les démangeaisons, assouplit la cicatrice et en atténue la rougeur**. la silicone de grade médical aplanit la cicatrice, permet sa réhydratation et limite son évolution.

Tous les composants du pansement CEREDERM® ont été sélectionnés pour leur biocompatibilité. Un soin particulier a été apporté à la mise au point de la silicone de grade médical.



#### INDICATIONS

Traitement et prévention des **cicatrices hypertrophiques** (en relief, de couleur rouge) et **chéloïdiennes** (excroissance fibreuses, fermes et épaisses) quelle qu'en soit l'origine (brûlure, acte chirurgical, accident, réaction dermatologique...)



#### CONTRE-INDICATIONS

Muqueuses, plaie ouverte, ulcère, escarre, suintement, brûlure non cicatrisée




#### RÉSULTATS

**Visibles après 2 à 3 mois d'utilisation.** Plus souple, aplanie et moins rouge, la cicatrice est visiblement atténuée.

### CEREDERM® est :

- ✓ Facile à découper : il s'ajuste à la cicatrice.
- ✓ Souple : il épouse parfaitement la morphologie.
- ✓ Indolore : il peut être porté 24h/24.
- ✓ Fin & transparent : il est discret.

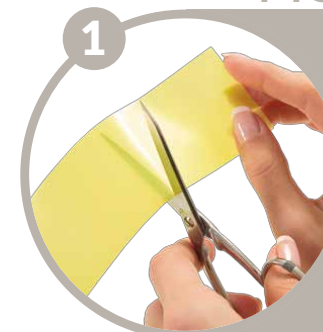

1

Extraire le pansement CEREDERM® de son emballage. Le découper ensuite aux dimensions souhaitées, de façon à recouvrir la cicatrice en respectant le pourtour d'au moins un centimètre.



2

Nettoyer et sécher avec soin la zone à traiter avant d'appliquer le pansement. Positionner ensuite la face adhésive du pansement sur la cicatrice fermée et retirer délicatement le film protecteur, sans appliquer de tensions.



3

Le pansement CEREDERM® s'utilise seul, sans ajout de crème, mais il est possible de lui associer une contention supplémentaire (bande élastique ou vêtement de contention). Le pansement est résistant à l'eau et repositionnable.

- ✓ EFFICACE
- ✓ INDOLORE
- ✓ INVISIBLE

- ✓ Auto-adhésif : il se maintient en place seul.
- ✓ Lavable : le même pansement peut-être porté de 2 à 3 jours.
- ✓ Efficace : il s'utilise seul, sans ajout de crème.

# RECOMMANDATIONS

# LA GAMME DE PANSEMENTS CEREDERM®



**CEREDERM®**  
PANSEMENTS SILICONÉS AUTO-ADHÉSIFS

## Pansement CEREDERM®

- ✓ Inspecter et nettoyer la cicatrice au moins une fois par jour à l'eau claire avec un savon neutre.
- ✓ Porter quotidiennement le pansement CEREDERM® pendant 2 à 3 jours (idéalement 24h/24).
- ✓ Ne pas utiliser le pansement plus de 5 jours et le remplacer dès que ses propriétés d'adhérence s'altèrent.
- ✓ Usage strictement personnel (monopatient)
- ✓ Durée de traitement recommandée : 2 à 6 mois
- ✓ En cas de réaction cutanée, interrompre le traitement et consulter votre médecin.

## CEREDERM® Gel

- ✓ Appliquer le CEREDERM® gel sur cicatrice fermée 2 fois par jour (matin et soir).
- ✓ Usage externe uniquement
- ✓ Durée de traitement recommandée : 2 à 6 mois



**Le pansement auto-adhésif et le pansement gel CEREDERM® ne protègent pas des rayons UV.**

Le pansement siliconé auto-adhésif Cerederm® et le pansement gel Cerederm® sont des dispositifs médicaux de classe I. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

Reproduction interdite même partielle

## 6 MODÈLES AUTO-ADHÉSIFS

REPOSITIONNABLES  
10 UNITÉS PAR BOÎTE

5 x 8 cm

Cerederm®  
5 x 8 cm

CODE CNK  
2221-877

10 x 20 cm

Cerederm®  
10 x 20 cm

CODE CNK  
2221-869

5 x 30 cm

Cerederm® 5 x 30 cm

CODE CNK  
2221-885



Cerederm® Couronne  
Ø 8 cm

CODE CNK  
2225-217



Cerederm® Ancre  
13 x 22 cm

CODE CNK  
2225-225

NOUVEAU



Cerederm® Lipostick  
30 UNITÉS PAR BOÎTE  
Ø 3,5 cm

CODE CNK  
3340-437

Adaptées aux suites opératoires dans le cadre d'une reconstruction ou d'une augmentation mammaire

S'adapte facilement aux petites surfaces (suite à une liposuction, à l'enlèvement de grain de beauté...)

## FORMULE GEL

1 UNITÉ PAR BOÎTE



Cerederm® Gel 15g

CODE CNK  
3090-180

NOUVEAU



Cerederm® Gel 50g

CODE CNK  
3340-445

Idéal pour les surfaces irrégulières, le visage, les articulations ou les plis de flexion



Z.I de Lambermont - 151 rue des Ormes  
B-4800 Verviers (BELGIQUE)

t : +32(0) 87 29 22 22  
f : +32(0) 87 29 22 23

www.euromi.com  
info@euromi.com

Traitement  
et prévention  
des cicatrices  
hypertrophiques  
et chéloïdiennes.

